

SARS-CoV-2
Antigen Self Test Nasal
Guida rapida di riferimento per i pazienti

Questa guida contiene le istruzioni per l'uso di SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal. Prima di utilizzare il test, è essenziale leggere le Istruzioni per l'uso per i pazienti.




Informazioni importanti sulla sicurezza

Avvertimento!

- Lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con un disinfettante per mani sia prima di eseguire il test sia dopo.
- Tenere pulito il bastoncino. Evitare di toccare la punta del bastoncino e assicurarsi che non entri in contatto con eventuali superfici prima dell'uso.
- Utilizzare il kit del test un'unica volta.
- Evitare il contatto con cute e occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare bene al fine di evitare irritazioni cutanee. Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio medico. In caso di fuoriuscita, pulire con cura utilizzando un disinfettante adatto.
- Non utilizzare i componenti del test nel corpo, fatta eccezione per il bastoncino incluso nel kit. Non ingerire nessuno dei componenti del test.

Componenti del kit del test

Confezione 1 contenente una cassetta test e un pacchetto di essiccante (x5)

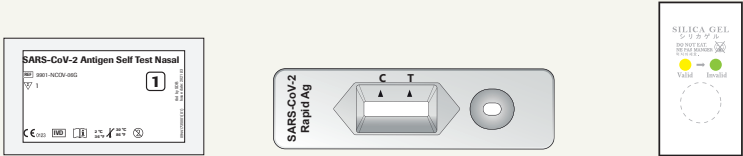

Confezione 2 contenente 5 provette con il liquido e 5 cappucci di chiusura (x1)



1 Preparazione del test


- Leggere attentamente le Istruzioni per l'uso per i pazienti di SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal.
- Prima di eseguire il test, lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con un disinfettante per le mani.
- Controllare la data di scadenza sul retro dei sacchetti di alluminio. Non usare il test se ha superato la data di scadenza.
- Aprire uno dei sacchetti di alluminio 1 lungo la linea di strappo ed estrarre la cassetta test e il pacchetto di essiccante.
- Assicurarsi che la cassetta test sia integra e che non siano presenti palline verdi nel pacchetto di essiccante. Non aprire il pacchetto di essiccante.

2 Raccolta e preparazione del campione nasale


- Aprire il sacchetto di alluminio 2 lungo la linea di strappo ed estrarre una delle provette con il liquido e un cappuccio di chiusura e collocarli sul tavolo.
- Aprire la tenuta della provetta facendo attenzione a non versare il liquido che contiene. Posizionare la provetta nell'apposito supporto.
- Soffiarsi il naso una volta con un fazzolettino di carta.
- Rimuovere il bastoncino dalla confezione. Accertarsi di toccare soltanto il manico del bastoncino e non il tampone in punta.
- Inclinare leggermente il capo all'indietro.
- Inserire il bastoncino con il tampone davanti nella narice sinistra. Far scorrere il bastoncino di circa 2 cm in avanti (parallelamente al palato, non verso l'alto) fino a quando non incontra resistenza. Non esercitare pressione.
- Ripetere i passaggi 6 e 7 nella narice destra servendosi dello stesso bastoncino. Nota: è necessario raccogliere i campioni da entrambe le narici utilizzando lo stesso bastoncino.
- Inserire il bastoncino nella provetta fino a quando il tampone è immerso nel liquido. Strizzare il fondo della provetta e tenerla saldamente. Agitare il bastoncino più di 10 volte per trasferire il materiale biologico dal bastoncino al liquido.
- Rimuovere il bastoncino continuando a strizzare la provetta ai lati, per estrarre tutto il liquido dal tampone. Smaltire il bastoncino e sigillare la provetta con il cappuccio di chiusura.

3 Esecuzione di un test

- Collocare la cassetta test su una superficie piana.
- Tenere la provetta dritta sopra al pozzetto circolare contrassegnato nell'immagine seguente (non sopra la finestra rettangolare dei risultati).
- Trasferire esattamente 4 gocce nel pozzetto circolare. Strizzare delicatamente i lati della provetta, se necessario. Nota: è possibile proseguire con il test anche se si trasferiscono accidentalmente 5 gocce sulla cassetta test.
- Impostare il timer e leggere il risultato del test dopo 15-30 minuti.
- Dopo avere eseguito il test, lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con un disinfettante per le mani.

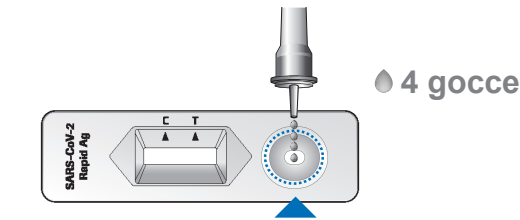

4 Interpretazione dei risultati

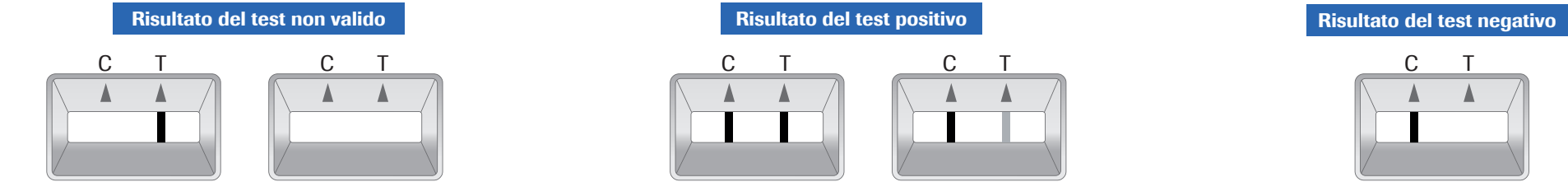

- Se una linea di controllo (C) non è visibile, il risultato deve essere considerato non valido. Il test non funziona correttamente e occorre eseguire un altro test utilizzando un altro kit. È possibile che il test sia stato eseguito in modo errato. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e ripetere il test. Se il risultato del test è ancora non valido, contattare il medico o un centro diagnostico COVID-19.
- Se è visibile una linea del test (T) insieme a una linea di controllo (C), significa che il risultato del test è positivo. Analizzare attentamente il risultato: il test deve essere considerato positivo se sono visibili due linee, anche se molto leggere. Un risultato del test positivo significa che è molto probabile che il paziente abbia contratto il COVID-19. Contattare immediatamente il medico curante o l'autorità sanitaria locale e attenersi ai protocolli locali relativi all'auto-isolamento. Il medico curante potrebbe decidere di farvi sottoporre a un test PCR per confermare l'esito.
- Se è visibile una linea di controllo (C) (a prescindere da quanto sia lieve) ma non è visibile alcuna linea del test (T), significa che il risultato del test è negativo. È quindi improbabile che il paziente abbia contratto il COVID-19. Tuttavia, anche se il test è negativo, occorre continuare ad osservare tutte le misure di igiene e di sicurezza. Se si teme di avere un'infezione (ad es. se i sintomi durano a lungo o se peggiorano), contattare il proprio medico curante. È possibile che si sia contratta un'altra infezione o che il risultato del test sia falso. Ripetere il test dopo 1-2 giorni; il COVID-19 non può infatti essere rilevato con certezza assoluta in tutte le fasi dell'infezione.